

## Fiche d'utilisation caméra main

### Présentation





- 1 - Bouton permettant :  
Allumage (maintenir).  
Déverrouillage/verrouillage  
(un appui simple)
- 2 - Bouton home
- 3 - Caméra frontale
- 4 - Bouton volume +/-
- 5 - Écran

### Conduite de l'examen


La caméra main n'est utilisable que lors d'un appel en cours, pour l'activer il faudra :

1. Dans Telemedica sur votre solution choisir le profil caméra main et vérifier que l'iPhone se connecte à un réseau.
2. Déverrouiller l'appareil en appuyant sur le bouton central et entrer le code 000000.
3. Lancer l'application caméra main.
4. Une fois sur l'application lancée, patienter quelques secondes le temps de la connexion.

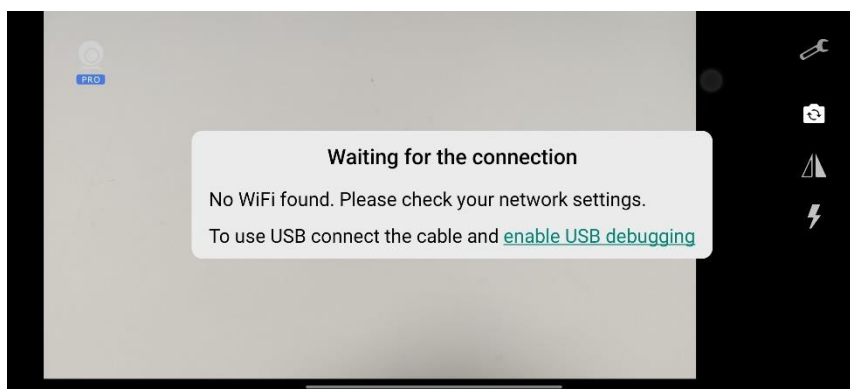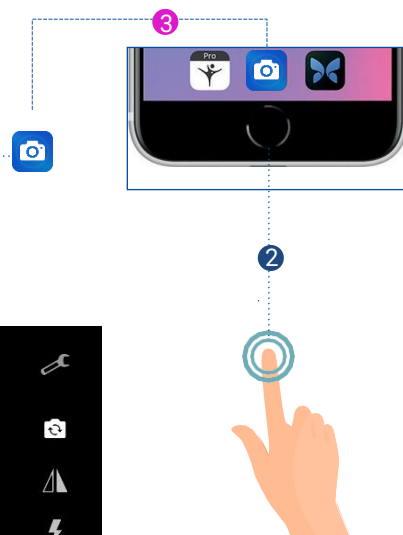

## Fiche d'utilisation caméra main

5. Les fonctions de la caméra main sont :

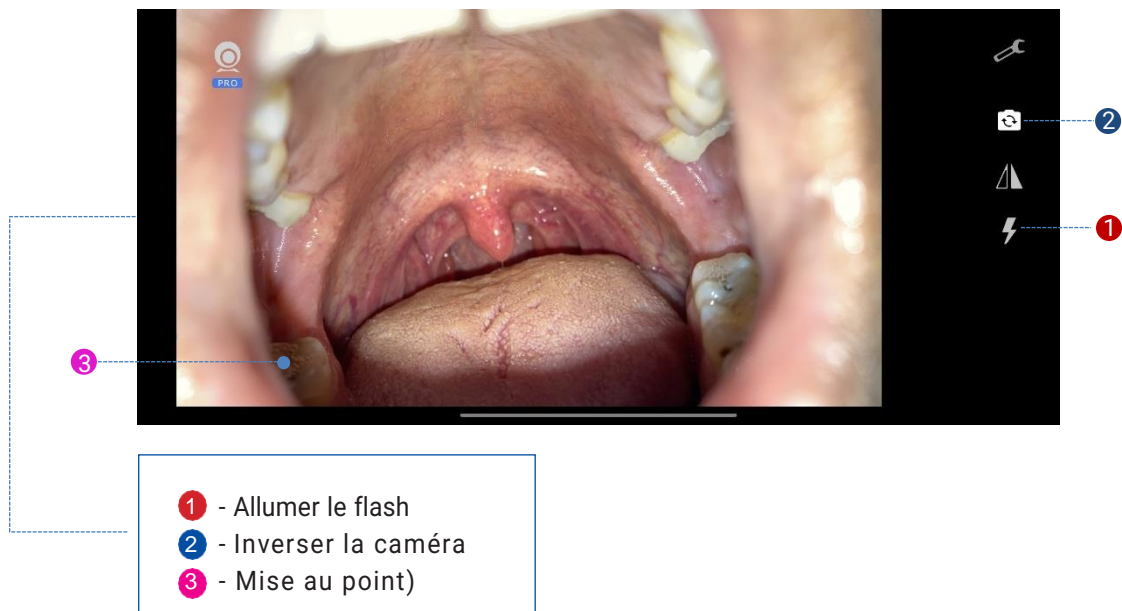

6. Le médecin a aussi la possibilité de prendre des photos depuis son poste.

7. Pour fermer l'application caméra main, appuyer deux fois de manière répétée sur le bouton principal du téléphone et effectuer un balayage vers le haut sur son aperçu.

8. Revenir au profil par défaut dans le logiciel Telemedica.

## Entretien et rangement

Rangement de l'appareil :

Brancher l'appareil sur son socle de recharge sans-fil et vérifier sa mise en charge.

Si besoin contactez une de nos HOTLINES disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00