

Fiche d'utilisation iPhone + dermatoscope Dermlite

Présentation




- 1 - Bouton permettant :
Allumage (maintenir).
Déverrouillage/verrouillage
(un appui simple)
- 2 - Bouton home
- 3 - Caméra frontale
- 4 - Bouton volume +/-
- 5 - Écran
- 6 - Lentille dermatologique
- 7 - Support lentille + éclairage

Conduite de l'examen

La caméra main n'est utilisable que lors d'un appel en cours sur l'application **Telemedica** sur votre solution, pour l'activer il faudra :


1. Déverrouiller l'appareil en appuyant sur le bouton central et entrer le code 000000.
2. Lancer l'application **Telemedica**.
3. Une fois sur l'application, le bouton appel passera du **rouge au vert** (si ce n'est pas le cas vérifier votre connexion internet).

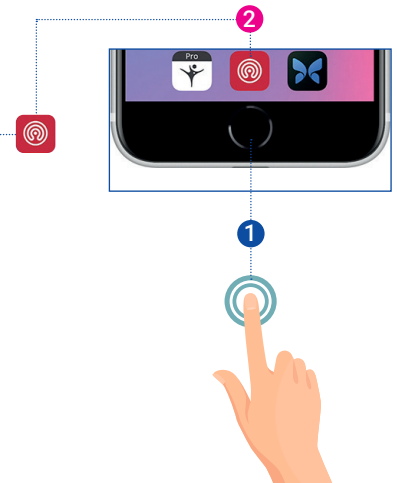

Fiche d'utilisation iPhone + dermatoscope Dermlite

4. Pour utiliser la lentille dermatologique, suivre les étapes suivantes :

- a. Placer la lentille dermatologique sur son support en suivant le sens de la flèche. 1
- b. Placer l'ensemble sur la partie magnétique de la coque du téléphone. 2
- c. Allumer l'éclairage de la lentille en appuyant sur le bouton situé sur le côté du support.

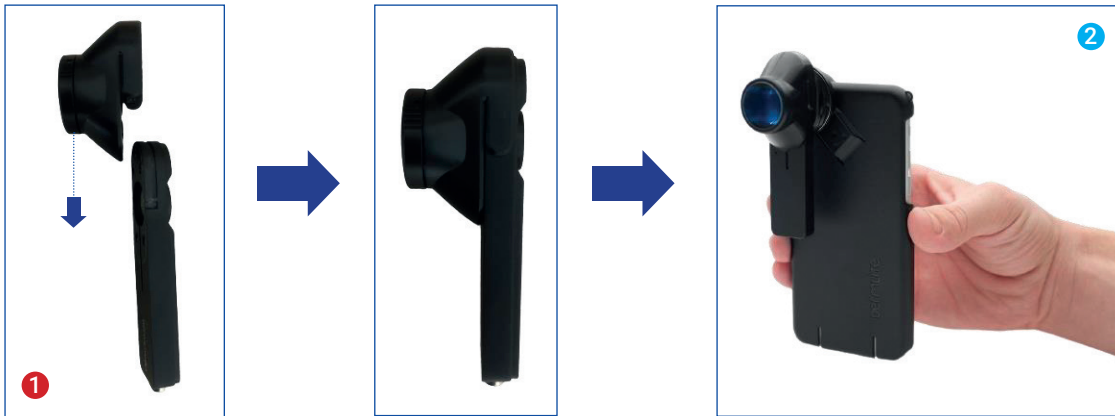

5. Le médecin a aussi la possibilité de prendre des photos depuis son poste.

Entretien et rangement

Entretien et nettoyage :

Après chaque utilisation, nettoyer la lentille du dermatoscope avec une lingette adaptée

Rangement du smartphone :

Décrocher l'ensemble support/lentille de la coque du smartphone, et éteindre l'éclairage de la lentille.
Déposer l'appareil sur son socle de recharge sans-fil et vérifier sa mise en charge.
Charger le support de lentille via l'adaptateur fourni et le ranger dans l'emplacement prévu.

Si besoin contactez une de nos **HOTLINES** disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00