




## Fiche d'utilisation ECG CardioSecur

### Présentation

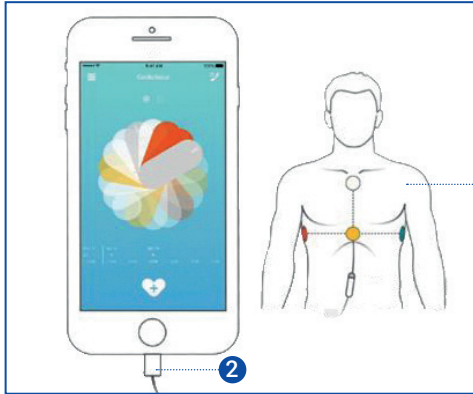

Voir la vidéo : utilisation de l'ECG ÉOLYS




- 1 - Positionnement des électrodes
- 2 - Branchement câble ECG sur port iPhone
- 3 - Électrode à usage unique (BlueSensor P)

### Conduite de l'examen

1. Dans l'application **Telemedica** sur votre solution choisir le profil ECG.



2. Déverrouiller l'appareil en appuyant sur le bouton central et entrer le code **000000**.

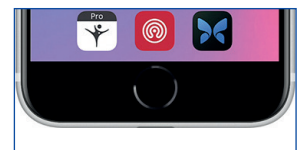

3. Lancer le mode AirPlay à partir des réglages accessibles via un **glissement vers le haut**, puis sélectionner « **Recopie de l'écran** » et cliquer sur le nom de la solution.



4. Revenir au menu principal en appuyant sur le bouton central.








## Fiche d'utilisation ECG CardioSecur

5. Brancher l'ECG au port de l'appareil et lancer l'application CardioSecur. ....



6. Procéder au placement des électrodes comme sur le modèle ci-dessous :

-  Électrode Blanche : extrémité osseuse supérieure du sternum.
-  Électrode Jaune : extrémité osseuse inférieure du sternum.
-  Électrode Rouge : sur la ligne médioaxillaire droite à hauteur de l'électrode jaune (point de vue patient).
-  Électrode Verte : sur la ligne médio-axillaire gauche à hauteur de l'électrode jaune (point de vue patient).

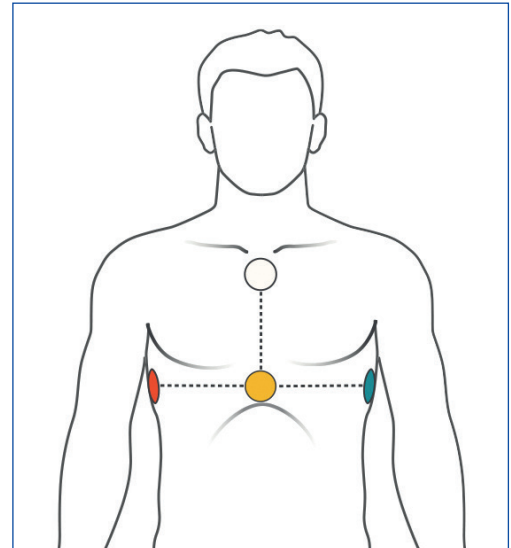

7. Une fois sur l'interface de l'application sur appareil, appuyer sur le bouton **enregistrement** pour lancer l'examen ECG (le patient doit être immobile afin d'éviter l'apparition d'artefacts).



Enregistrement

8. Une fois l'examen terminé, **envoyer le fichier par mail** via le smartphone sur l'adresse mail **smartphoneXX@hopimedical.eu** en cliquant sur « **exporter** » puis « **mail** ».

9. Revenir sur **Telemedica**, accéder au dernier mail, cliquer sur la petite flèche et sélectionner « **télécharger** ».



(Vérifier que le document est bien présent dans l'onglet documents partagés)

## Entretien et rangement

### Entretien et nettoyage :

Après chaque utilisation, nettoyer les électrodes avec une lingette désinfectante adaptée.

### Rangement de l'ECG :

Enrouler le câble de l'ECG sans le plier afin d'éviter qu'il ne se coupe.

Si besoin contactez une de nos **HOTLINES** disponibles ou contactez le **03 83 17 57 00**