


Fiche d'utilisation microphone annulation d'écho Jabra

Présentation

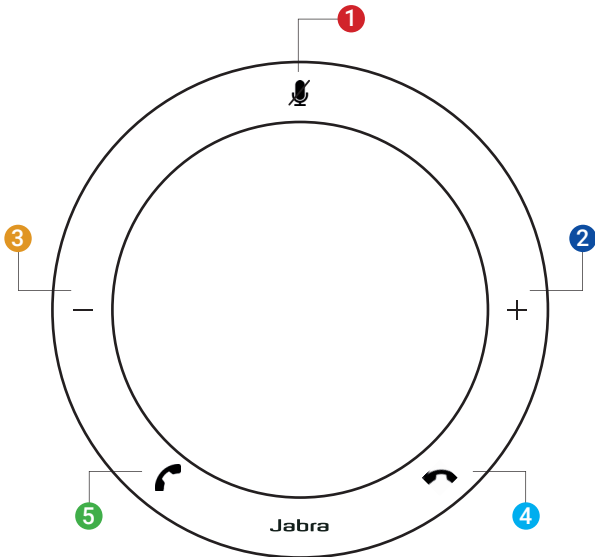

- 1 - Bouton muet
- 2 - Bouton d'augmentation du volume du haut-parleur intégré
- 3 - Bouton de diminution du volume du haut-parleur intégré
- 4 - Bouton fin d'appel (non utilisable)
- 5 - Bouton de prise d'appel (non utilisable)

Utilisation

Au début d'un appel monter le volume à son maximum en appuyant sur la touche + jusqu'à ce que toutes les led encadrant le microphone soient allumées en vert. S'il est nécessaire d'affiner le volume, le faire sur l'application Telemedica.



Ne pas débrancher l'USB du haut-parleur du panel PC.

Si toutes les LED sont allumées en rouge, le microphone est en muet, appuyer sur muet (bouton 1) pour désactiver ce mode.

Entretien et rangement

Entretien et nettoyage :

Éviter tout contact direct avec de l'eau ou d'autres produits liquides.

Rangement du microphone :

Remettre dans le compartiment ou dans l'emplacement prévu (FMC/Wallet).
Laisser sur le clavier tactile (LimStar) ou à côté du clavier (MiniLim).

Si besoin contactez une de nos HOTLINES disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00