


## Fiche d'utilisation otoscope ORLvision

### Présentation

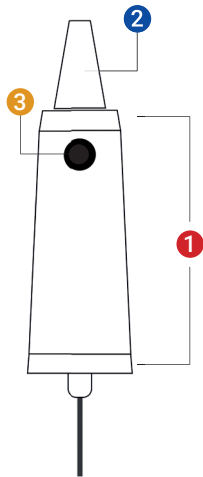

- 1 - Otoscope
- 2 - Speculum
- 3 - Indicateur de position

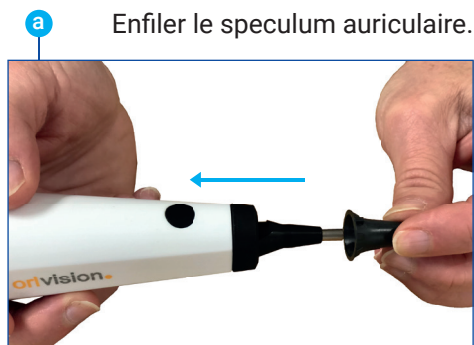


Figure 1: Otoscope OX2

Voir la vidéo : utilisation de l'otoscope

### Conduite de l'examen

1. Équiper un speculum auriculaire sur l'extrémité de l'otoscope en suivant les étapes suivantes :



2. Le dispositif doit être tenu comme un crayon, afin de faciliter la manipulation (voir figure 2 page suivante). De plus, l'indicateur de position doit être dirigé vers le haut pour que le point de vue de la caméra de l'otoscope soit correctement orientée.

## ■ Fiche d'utilisation otoscope ORLVision

3. Placer le dispositif à l'entrée du conduit auditif de la manière suivante :


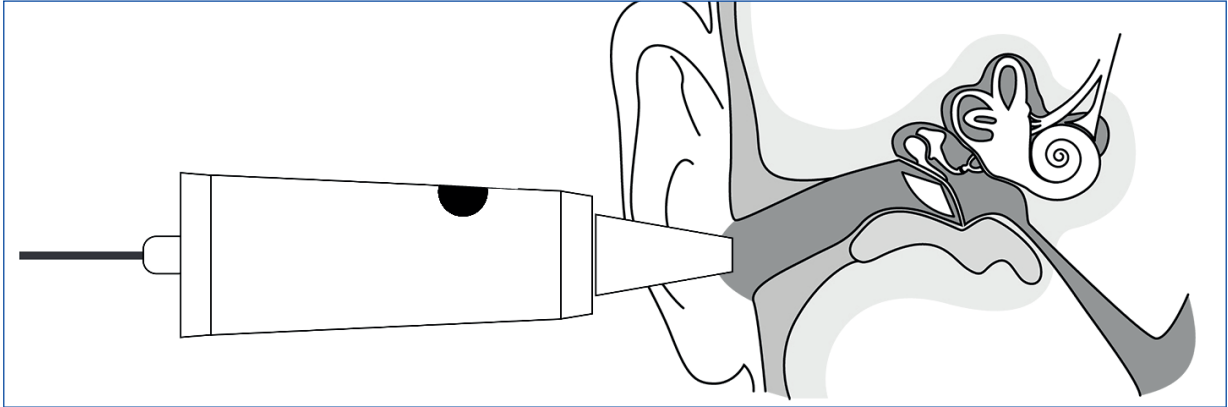


Figure 2: Placement de l'otoscope

4. Dans l'application Telemedica sur votre solution choisir le profil otoscope.



5. Il est parfois nécessaire, avec votre main libre, de tirer le pavillon vers le haut et vers l'arrière pour inspecter l'oreille.

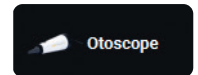

**Ne pas débrancher l'USB de l'otoscope.**

**La LED s'allume à l'activation du profil dans Telemedica et s'éteint à l'arrêt de l'ordinateur.**

## Entretien et rangement

### Entretien et nettoyage :

Après chaque utilisation retirer le speculum usagé et utiliser une lingette désinfectante pour nettoyer la lentille de l'otoscope.

### Rangement de l'otoscope :

Déposer l'otoscope dans le socle prévu pour son rangement.

**Si besoin contactez une de nos HOTLINES disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00**